

5endila semplice

I parametri di trattamento dell'innovativa IVT sono intervalli variabili quasi liberamente delle fasi di pressione negativa e normale e l'intensità variabile della pressione negativa. Quindi può essere attivato il flusso arterioso, venoso o linfatico in modo differenziato funzionalmente e in funzione dell'indicazione.

Sono disponibili diversi programmi di trattamento specifici per indicazione. Funzionano automaticamente con la semplice pressione di un pulsante. Le impostazioni preprogrammate si basano sull'esperienza di oltre 100.000 applicazioni. Ciò garantisce le migliori pratiche e rende la terapia non solo efficace ma anche semplice, sicura e delegabile.

Un trattamento dura dai 30 ai 40 minuti a seconda dell'indicazione. L'applicazione è quasi senza contatto ed è sempre percepita come piacevole dal paziente. Nella terapia del dolore per le malattie delle arterie periferiche o nel trattamento delle ferite croniche sono prescritte da 8 a 16 sedute in un periodo da tre a sei settimane. I pazienti ricoverati possono essere trattati quotidianamente con IVT.

Adatto a chi?

IL'IVT con il dispositivo brevettato VACUMED® viene utilizzato in medicina vascolare (anche chirurgia vascolare) e nella gestione delle ferite. Le sedi sono strutture per fisioterapia, centri per il diabete, cliniche per le gambe, centri per ferite o cliniche di riabilitazione con un focus sulla medicina vascolare. Sono possibili anche pratiche di medicina interna.

Dettagli

Programmi di trattamento automatici preimpostati per, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- m malattie occlusive arteriose periferiche (PAOD, stadio II - IV)
- m sindrome del piede diabetico
- m ferite croniche (arteriose, venose e miste)
- m sindrome post-trombotica (CVI)
- m ec. linfedemi e linfonodi/lipedemi combinati
- m disfunzione erettile indotta da arteriosclerotica (DE)
- m allenamento vascolare passivo ea distanza di camminata

Inclinazione dello schienale regolabile elettricamente per una posizione piegata ottimale (modello standard)

Inserimento elettrico del lettino per pazienti non mobili (solo VACUMED® SL)

Prodotto medico di classe IIa


Brevettato

Made in Germany



L'IVT riduce i costi per i DRG e dispone di modelli di fatturazione interessanti. L'investimento si ripaga sorprendentemente velocemente. Contribuisce ad aumentare le prestazioni e l'efficienza della struttura medica e migliora la qualità della vita dei pazienti in modo rapido e permanente. La parola d'ordine è il flusso.

Il modello VACUMED® SL con inserimento elettrico del lettino, per pazienti di peso fino a 160 kg.

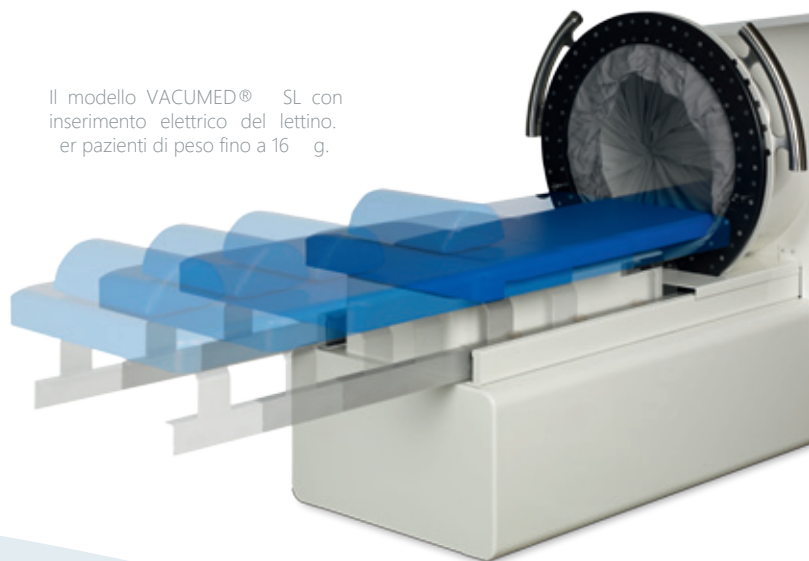

HWWDOLWHFLFL

Misure del dispositivo	2200 (2250*) x 1200 x 1100 mm (L, P, A) Per pazienti con peso fino a 165 kg
Peso del dispositivo	110 kg (185 kg*)
ensione di rete	230 V / 50 – 650 Hz, 1.300 VA
Colori	Bianco alpino. Verniciatura speciale disponibile su richiesta

* VACUMED® SL



Distribuito da Crioterapia.com
info@crioterapia.com
www.crioterapia.com
+39 375 558 6449



Weyergans High Care AG | D-52355 Dueren
www.vacumed.de | info@vacumed.de
Tel. +49-(0)2421-96780

